


**Paso # 1: Ajuste vertical**

Ajuste las piezas de la nariz para colocar el centro de Ocular (entre los dos tornillos, ver Vista lateral) aproximadamente 2 mm por encima del centro de la pupila al mirar hacia adelante.

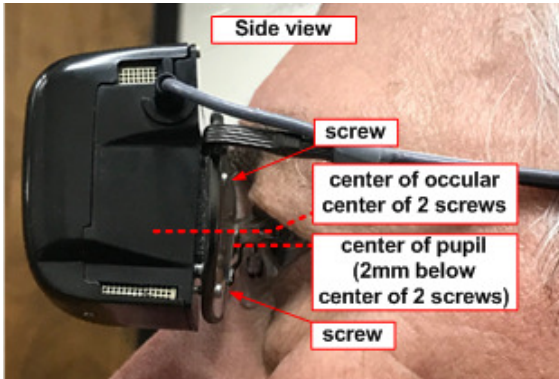

**Paso # 2: Ajuste horizontal**

Asegúrese de que seeBOOST esté ajustado a la cara del paciente utilizando el puente de la nariz, y los marcos están uniformemente centrado en la cara del paciente.




Mirando hacia abajo en la cabeza del paciente, confirme que el ocular se centra horizontalmente sobre la pupila. Si no, puede desplazar ligeramente las piezas de la nariz para compensar esa desalineación.



**Paso # 3: Ajuste de oreja (auriculares ?)**

Ajuste los auriculares para asegurar que los marcos no deslice hacia abajo la nariz al tirar ligeramente en la puente (o cuando la cabeza del paciente está inclinada recta hacia abajo).

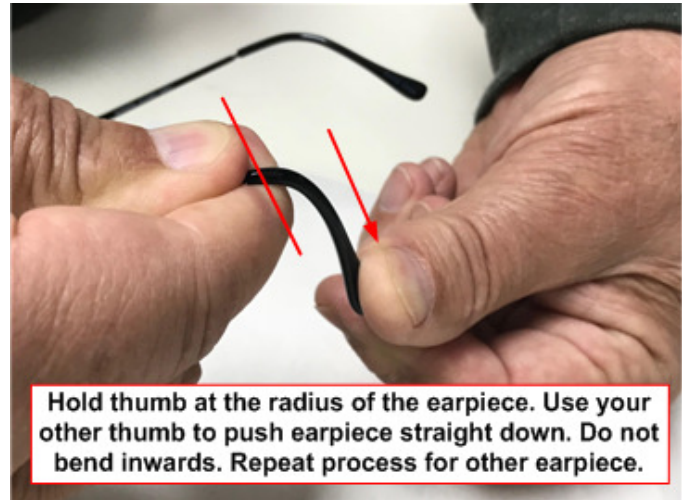

Tire hacia abajo en el puente del seeBOOST para Asegúrate de que no se caigan. Si se deslizan hacia abajo ajuste las piezas de la nariz y los auriculares según sea necesario.



**Paso # 4: Volver a comprobar**

- Pida al paciente que se quite las gafas y luego ponga ellos de nuevo.
- Confirmar que los lentes estén correctamente alineados verticalmente en el puente de la nariz (si no, repita procedimiento según sea necesario)
- Repita este procedimiento una vez más (para ayudar paciente recuerda).

**Si tiene alguna pregunta, llámenos al (972) 643-8498**